



kein Rückfluss, Gefäßtraining

APPARATIVE ENTSTAUUNGSTHERAPIE LYMPHA-MAT

Bei diesem patentierten Therapiegerät realisiert der gradierte Behandlungsdruck ein physiologisch effizientes Druckgefälle und somit eine sanfte und schonende Entstauung, die auf die einzelnen Gewebeschichten und Gefäße wirkt. Dank dieser Methode kann die Flüssigkeit, die durch den in den Kammern aufgebauten Druck mobilisiert wird, ohne Rückfluss ungehindert abströmen. Das Gewebe wird entstaut, der venöse Rückfluss gefördert, Stoffwechsel und Gasaustausch werden nachhaltig verbessert. Es sind Arm- und Beinmanschetten sowie Kompressionshosen erhältlich.

Wirkungsprinzip

Die zwölf überlappenden Luftkammern einer Behandlungsmanschette werden bei einem Kompressionszyklus, distal beginnend, nacheinander mit Luft gefüllt. Alle Kammern bleiben so lange gefüllt, bis die letzte den gewünschten Druck erreicht hat. Danach entweicht aus allen Kammern gleichzeitig die Luft, und nach einer Pausenzeit beginnt der Aufpumpzyklus erneut.

Tipp für operativ zu behandelnde Sportverletzungen

Bei verletzungsbedingten Schwellungen: Behandlung und Ruhigstellung in einem – Schwellungen im Knöchelbereich lassen sich präoperativ behandeln, bis der Eingriff möglich ist.

Indikationen & Anwendungsbereiche

- Primäres und sekundäres Lymphödem
- Thrombose-Prophylaxe
- Postthrombotisches Syndrom
- Ulcus cruris
- Ödem-Mischformen



abnehmender Druckgradient

IHR VORTEIL

- Ein Therapiegerät – viele Einsatzmöglichkeiten
- Eigenständige und entspannte Behandlung
- Auch bei Schwellung nach intensivem Sporttraining oder chirurgischen Eingriffen