


Vorbereitung

Wichtig: Nicht auf eingecremter Haut behandeln!

Tipp: Sorgen Sie dafür, dass Sie während der Therapie ungestört sind und nicht aufstehen müssen. Nehmen Sie eine für die Therapie angenehme Position ein.

1. Reduzierstücke anbringen: Gelb an das gelbe Kabel und rot an das rote Kabel:

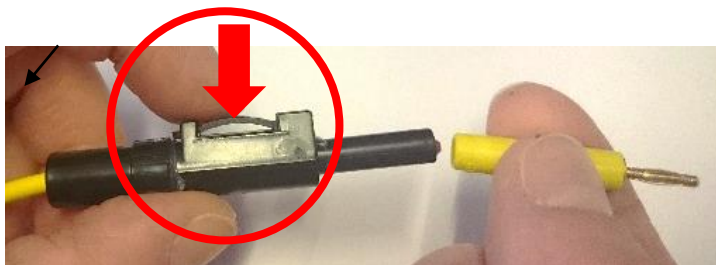


Clip fest eindrücken
und halten



Reduzierstück
aufstecken

2. Elektroden anstecken:

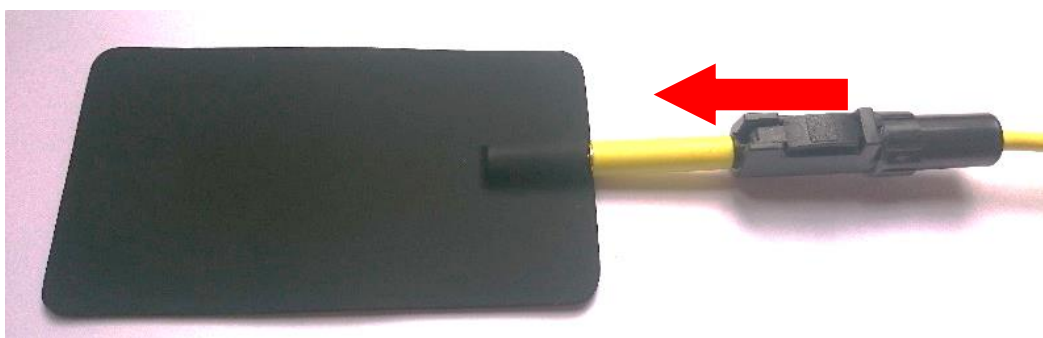


Dünnen Stecker in das Loch der Nase der Elektrode einstecken


3. Schwammtaschen mit handwarmem Wasser nass machen. Es soll nicht tropfen, aber gut durchfeuchtet sein.

Tipp: Besser zu nass als zu trocken

4. Gummielektroden komplett in die feuchten Schwammtaschen einschieben:

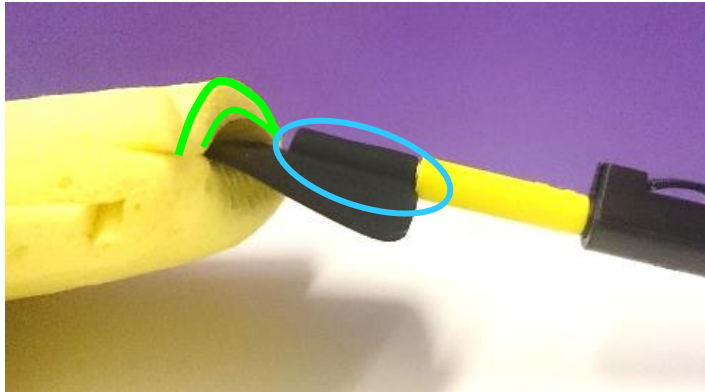

Die Nase der Elektrode (**blau**) muss auf der dünnen Seite (**grün**) liegen. Die dicke Seite der Schwammtasche kommt auf die Haut.

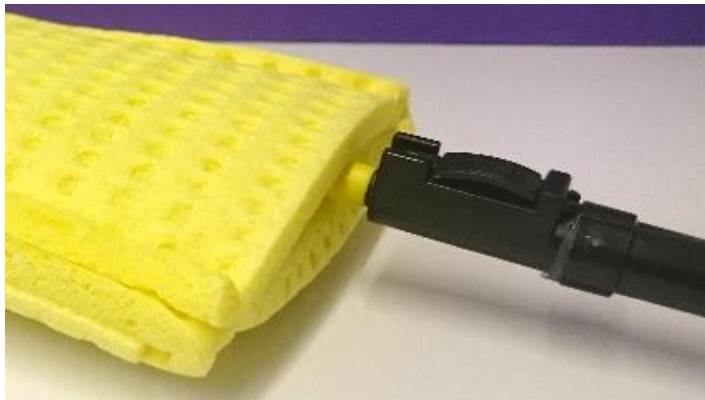

Richtig und komplett eingeschobene Gummielektrode

5. Die feuchten, mit Elektroden gefüllten und angesteckten Schwammtaschen mit der **dicken Fläche auf die Haut** auflegen und mit den Klettbandern flächig und fest fixieren.



Wichtig: Das Klettband soll die Schwammtasche möglichst komplett bedecken und muss fest anliegen.

Hinweis: Bei Unsicherheiten zur Vorgangsweise konsultieren Sie Ihre behandelnde Ärztin / Ihren behandelnden Arzt.

Therapie

1. Gerät einschalten und kurz warten bis der Selbsttest abgeschlossen ist. Die zuletzt verwendete Stromform erscheint automatisch.

Wichtig: Kontrollieren Sie, ob die **richtige Stromform** eingestellt ist!

Achtung: Verändern Sie keine Einstellungen!*

*Ausnahme: Bei der Einschulung wurde dies explizit besprochen.

Falsche Einstellungen können zu Komplikationen führen!

2. Elektrodenkabel an die Buchse an der Gerätefront anstecken.
Der Stecker lässt sich nur in einer Ausrichtung einstecken!
Abhängig vom Gerät haben Sie entweder den runden oder den eckigen Stecker:



Roter Punkt an der Oberseite



Schraube an der Unterseite

3. Um die Therapie zu beginnen, drehen Sie langsam am Drehregler bis Sie die entsprechende Wirkung wahrnehmen.
4. Nach Ablauf der Zeit ertönt ein akustisches Signal.
Den Drehregler zurück auf Null drehen (gegen den Uhrzeigersinn) bis dieser einrastet.
5. Sie können das Gerät nun ausschalten und die Elektroden abnehmen (bitte beachten Sie die Reinigungshinweise), oder wie in der Einschulung besprochen Ihre Therapie mit einer weiteren Stromform bzw. an einer anderen Lokalisation fortsetzen.

Hinweis: Bei Unsicherheiten zum Therapieablauf konsultieren Sie Ihre behandelnde Ärztin / Ihren behandelnden Arzt.

Wichtige Reinigungshinweise

i Schwammtaschen

Nach jeder Behandlung gut mit Leitungswasser auswaschen und 1x pro Woche für 10 Minuten auskochen. Beachten Sie dabei folgenden Hinweis:

Wichtig: Kein Waschmittel oder anderes Reinigungsmittel verwenden! Rückstände greifen die Haut an.

Tipp: Zum Trocknen wie abgebildet aufstellen.

Aus hygienischen Gründen werden gebrauchte Schwammtaschen, Klettbänder und Klebe- und Gummielektroden von uns nicht wieder aufbereitet, sondern entsorgt. Sie können diese daher nach Ende der Mietdauer behalten oder im Hausmüll entsorgen.



i Gummielektroden

Nach jeder Behandlung kurz abwaschen und trocknen lassen. Nicht übermäßig an der Oberfläche reiben.

Gummielektroden sind ein Verbrauchsprodukt – sie verlieren durch den Gebrauch an Leitfähigkeit. Wir empfehlen eine halbjährliche Überprüfung.

Wir wünschen Ihnen einen guten Therapieerfolg!